

GIOCO



Alívio da Pressão Híbrido



Sistema Hybrid



O sistema Gio-Form Hybrid é um sistema alternativo de substituição de colchão que alia as comodidades da moderna tecnologia de espuma e os tradicionais colchões de ar dinâmicos.

O design destina-se a pacientes considerados de **"Muito Alto Risco"** de desenvolvimento de úlceras por pressão.

Este sistema **"Plug and Play"** é muito fácil de utilizar e requer uma formação inicial mínima para ser operado. É ideal para utilização em comunidade.

Combinando a bomba mais silenciosa do mercado com elevados níveis de conforto, este sistema oferece um pacote muito flexível, com pouca ou nenhuma perturbação do conforto do paciente, dada a simplicidade na montagem para satisfazer as necessidades clínicas específicas de um paciente. Isto, por sua vez, reduz significativamente os custos logísticos de descontaminação.

O material do revestimento em "Dartex" soldado por alta frequência expande-se em várias direções, possui excelentes propriedades de permeabilidade e um tempo de vida útil longo, cumprindo ao mesmo tempo os requisitos rigorosos de controlo de infeções.


Hybrid



1. Concebido e fabricado no Reino Unido
2. Garantia alargada de 5 anos*
3. Utilização com pacientes de "Muito Alto Risco"
4. Tecnologia Dual Cell
5. Peso máximo do paciente: 250 kg
6. Assistência técnica ilimitada**

Células de ar híbridas Dual Cell

A nossa abordagem holística ao design resultou no desenvolvimento da tecnologia "Dual Cell" que proporciona uma estabilidade adicional e previne a "torção da célula" ou a deslocação involuntária da posição da célula, a qual cria espaços vazios/brechas dentro da área de suporte.

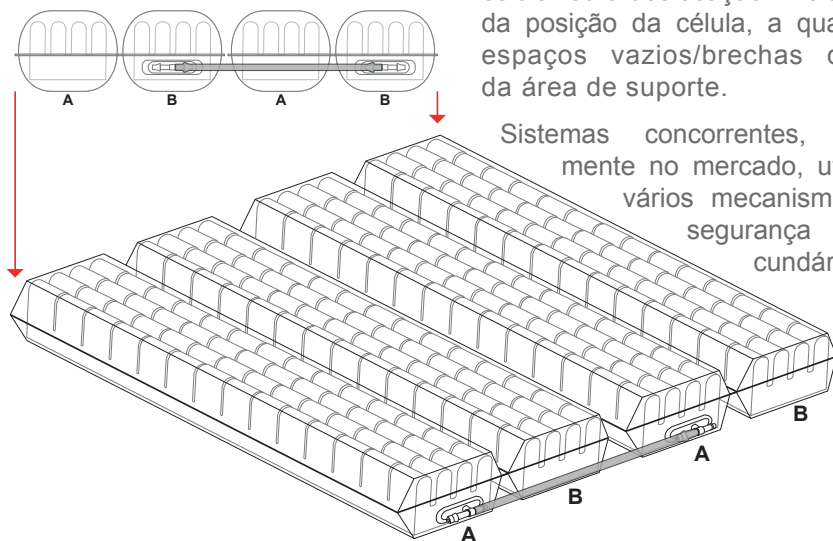

Sistemas concorrentes, atualmente no mercado, utilizam vários mecanismos de segurança secundários.

*Para poder beneficiar da garantia de 5 anos, a manutenção do sistema deve ser feita anualmente pela Gioco Ltd.

**Assistência técnica durante toda a vida útil do produto com opções para atualizações prontamente disponíveis, desde que não existam problemas de compatibilidade.

Unidade de bomba Hybrid G4



1. Concebida e fabricada no Reino Unido
2. Unidade de bomba "Plug and Play"
3. Garantia alargada de 5 anos*
4. Praticamente silenciosa

*Para poder beneficiar da garantia de 5 anos, a manutenção do sistema deve ser feita anualmente pela Gioco Ltd.

Hybrid



Facilidade de utilização



O sistema **"Plug and Play"** é simples e fácil de utilizar. O colchão Gioco Hybrid foi concebido e fabricado utilizando materiais de elevada qualidade que permitem que, mesmo sem bomba, o sistema esteja sempre pronto. Um paciente pode deitar-se no colchão mesmo antes de adicionar a bomba e premir **"ON"**. O sistema vem predefinido para o modo de Baixa pressão .

Na eventualidade de uma falha, um conjunto abrangente de alarmes integrados irá alertar o operador ou o pessoal de enfermagem. O design ergonómico utilizado permite um controlo/intervenção mínimo por parte do operador, bem como uma formação muito reduzida (e básica) , tornando o sistema ideal para ambientes comunitários e UTI.


Componentes da Melhor Qualidade

Na Gioco, acreditamos que a melhor maneira de criar um produto durável e de qualidade é através da utilização de componentes da melhor qualidade para satisfazer os princípios do design, oferecendo assim uma solução planeada.

O sistema foi concebido internamente com o máximo controlo sobre cada fase do processo de conceção e fabrico. Todos os componentes moldados por injeção são trabalhados e fabricados internamente , bem como os mecanismos eletrónicos e de distribuição de ar , utilizando uma experiência substancial, reunida ao longo de mais de 40 anos no setor dos equipamentos médicos.


Todos conseguem adquirir conhecimento, mas, na Gioco, sustentamos esse conhecimento com a nossa sabedoria, o que nos torna a nós e aos nossos produtos distintos.

Colchão Hybrid

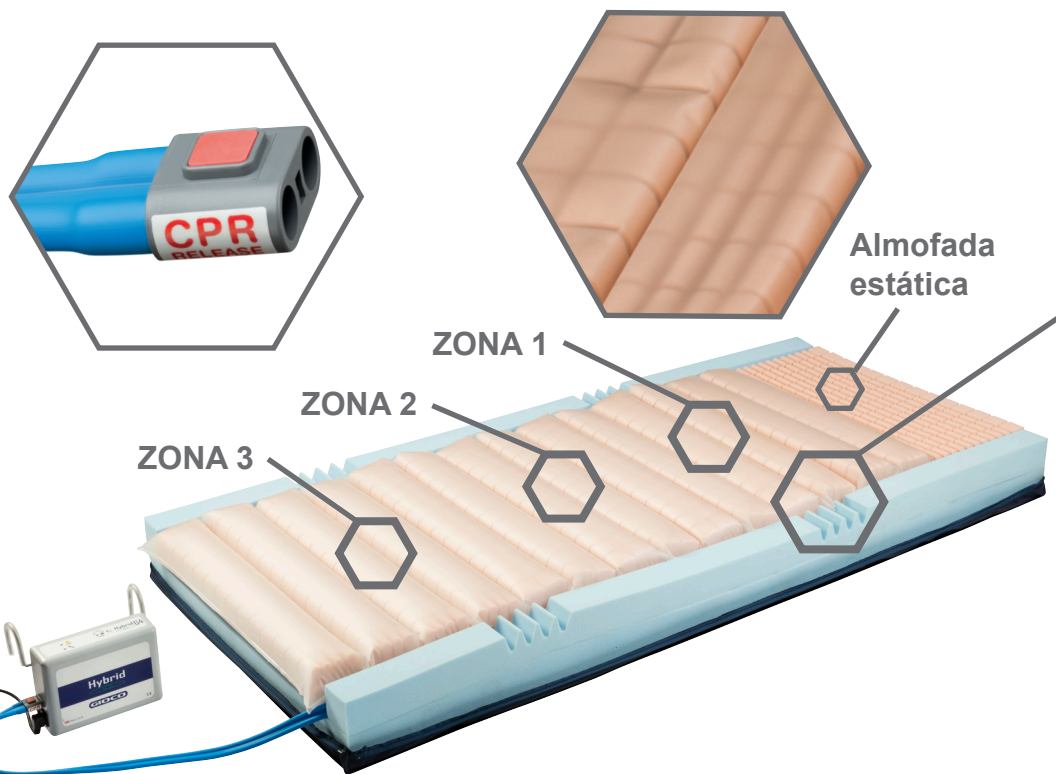

1. Concebido e fabricado no Reino Unido
2. Três zonas de pressão diferentes
3. Configuração rápida. Atinge a pressão em 2 minutos
4. Funcionamento estático ou dinâmico

Hybrid

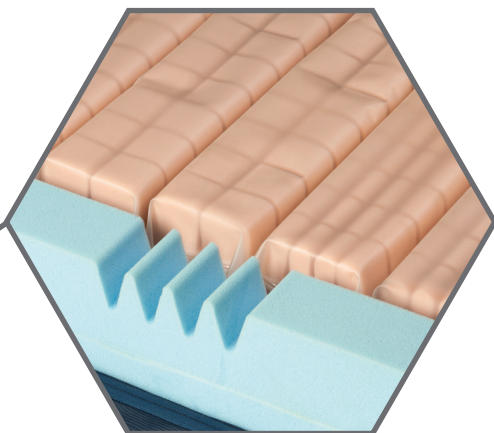

- 7 pares de células
- Revestimento superior em Dartex
- Células de ar côncavas
- Recortes nas paredes laterais
- Peso do paciente: 250 kg
- Esvaziamento CPR rápido
- Tubo de ar coberto



Comando Static Care Comfort



1. Concebido e fabricado no Reino Unido
2. Não necessita qualquer fonte de alimentação
3. Funcionamento a Custos ZERO
4. Silencioso

Hybrid



Sistema Estático com Regulação

Há o "Static" e o "Static Comfort". Apresentamos o mais recente modelo de entrada da Gioco, que oferece um colchão de cuidados estático regulável para um conforto personalizado.

Não necessita de qualquer fonte de alimentação (bateria ou rede elétrica). Um mecanismo inteligente de regulação de ar integrado permite ao operador personalizar o conforto adequado a cada paciente ou a cada fase do período de recuperação ou cuidados de enfermagem.

O comando Static Care Comfort liga-se simplesmente à saída de ar do colchão **Hybrid** ou do colchão **Bariatric Hybrid** e, em seguida, regula a pressão de ar no interior das células de ar.

A pressão no interior das células de ar pode ser regulada desde 10 mmHg a 30 mmHg.

O sistema melhora o desempenho do colchão Hybrid normal, sem a complexidade ou o incómodo por vezes associado aos sistemas dinâmicos.

O sistema Static Care Comfort tem **um funcionamento a custo zero** e é 100% seguro, uma vez que não contém peças móveis no interior do sistema.

Descrição geral para o utilizador

Ligue o tubo do colchão à caixa do comando.

Coloque o botão de comando na posição pretendida (Nível 1-3)

Deite o paciente na cama.

O sistema regula automaticamente a pressão das células de ar.

O sistema irá reiniciar sempre que o paciente entrar e sair da cama.

Especificações Técnicas

Unidade de Bomba Hybrid

Número de série.....	Conforme etiqueta na parte traseira da bomba
Alimentação elétrica.....	220 – 240 volt, 50 Hz
Consumo de energia.....	10 watts
Fusíveis.....	TA1H 250 V
Proteção contra choques.....	Classe 2
Nível de ruído.....	Aprox. 25 dB
Duração do ciclo.....	12 minutos
Tipo de ciclo.....	1 em 2
Níveis de pressão.....	Baixa 18 mmHg Alta 28 mmHg
Dimensões.....	265 x 175 x 90 mm
Peso.....	1,6 kg
Intervalo de manutenção.....	12 meses / 8.760 horas
Vida útil estimada.....	5 anos
Prazo de durabilidade das peças.....	5 anos

Comando Static Care Comfort

Número de série.....	Conforme etiqueta na parte traseira da caixa
Alimentação elétrica.....	Não necessita
Consumo de energia.....	0 watts
Fusíveis.....	Nenhuns
Proteção contra choque.....	NA
Nível de ruído.....	Aprox. 5 dB
Dimensões.....	265 x 175 x 90 mm
Peso.....	0,8 kg
Intervalo de manutenção.....	12 meses / 8.760 horas
Vida útil estimada.....	5 anos
Prazo de durabilidade das peças.....	5 anos

Hybrid



Colchão Hybrid

Número de série.....	Etiqueta no tubo de ar do colchão
Número de células de ar.....	14 Células de ar (7 pares)
Material das células de ar.....	Película em PU de 300 um
Secção da almofada.....	Espuma de alívio de pressão estática
Núcleo da espuma em "U".....	75 mm
Dimensões.....	1990 x 900 x 150 mm (Nominal)
Peso.....	14 kg
Material do revestimento superior.....	Dartex Performance 602
Vida útil estimada das células do colchão.....	5 anos
Prazo de durabilidade das peças do colchão.....	5 anos

Hybrid - Perfil do paciente

Sistema de espuma Static

Peso máximo do paciente.....	159 kg
Nível de risco do paciente.....	Pacientes de médio risco

Sistema Static Care Comfort

Máx. Peso do paciente.....	190 kg
Nível de risco do paciente.....	Pacientes de alto risco

Sistema de bomba Hybrid

Peso máximo do paciente.....	250 kg
Nível de risco do paciente.....	Pacientes de muito alto risco

GIOCO Ltd.

310-312 Dallow Road
Luton, Bedfordshire,
LU1 1TD, Inglaterra.

W. www.mjsgrp.com

E. sales@mjsgrp.com

T. +44 (0)1582 344 970

